


## Prelievo dei campioni cervicali


Il *digene*<sup>®</sup> Cervical Sampler\* di QIAGEN è uno specifico dispositivo per il prelievo del DNA da usarsi con il *digene* HPV HC2 DNA Test. Confrontato con un prelievo di citologia liquida†, il *digene* Cervical Sampler offre maggiore garanzia che la quantità di cellule prelevata sia sufficiente per l'esecuzione del Test HPV. Per lo screening primario, usare il *digene* Cervical Sampler unitamente a un dispositivo per il Pap Test, al fine di evitare di richiamare la paziente e consentire al laboratorio di eseguire simultaneamente entrambe le analisi.

### Raccolta di campioni con il *digene* Cervical Sampler

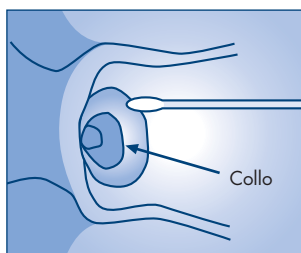

#### Preparazione

Rimuovere il muco in eccesso dal collo dell'utero e dall'ectocervice usando del cotone o un tampone Dacron<sup>®</sup>. Smaltire il tampone.

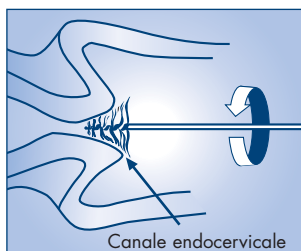

#### Fase 1


Inserire di 1–1,5 cm il dispositivo nel canale endocervicale fino a quando le setole esterne non toccano l'ectocervice. Ruotare per tre giri completi in direzione antioraria. Non inserire completamente il dispositivo nel canale cervicale.

Rimuovere il dispositivo dal canale. Evitare che le setole tocchino la parte esterna della provetta o altri oggetti (non illustrato).



#### Fase 2

Inserire l'estremità dello spazzolino nella parte inferiore del contenitore di trasporto. Rompere lo stelo in corrispondenza della linea di taglio, lasciando spazzolino nella provetta.

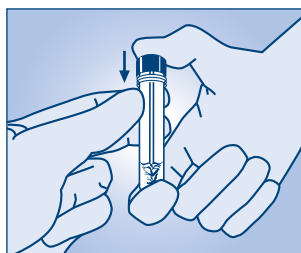

#### Fase 3

Richiudere accuratamente il contenitore facendo scattare il cappuccio. Per le istruzioni sulla conservazione e la spedizione, consultare il foglietto illustrativo.

\* Questo dispositivo di prelievo non è inteso per la raccolta di campioni ai fini del Pap Test.

† ThinPrep<sup>®</sup> PreservCyt<sup>®</sup> è approvato dalla FDA e marcato CE per l'esecuzione del test *digene* per l'HPV.

## Informazioni d'ordine

Prodotto	Contenuto	N. cat.
<i>digene</i> HPV HC2 DNA Test	Per 40 campioni cervicali ad alto e basso rischio (96 test)*	5196-1330
<i>digene</i> High-Risk HPV HC2 DNA Test	Per 88 campioni cervicali (96 test)†	5197-1330
<i>digene</i> Cervical Sampler	Spazzola cervicale e provetta di trasporto per campioni	5122-1220

\* Include il diluente per la sonda, la sonda alto rischio e basso rischio, controlli di qualità, calibratore, micropiastra di cattura, reagenti e tamponi.

† Include il diluente per la sonda, la sonda alto rischio, controlli di qualità, calibratore, micropiastra di cattura, reagenti e tamponi.

Il *digene* HPV HC2 DNA Test e il *digene* High-Risk HPV HC2 DNA Test sono intesi per un uso diagnostico *in vitro*.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.qiagen.com/hpv](http://www.qiagen.com/hpv).

I test *digene* CT/GC HC2 DNA possono essere eseguiti sul campione. Controllare presso il laboratorio per la disponibilità.

Marchi: QIAGEN®, *digene*®, Hybrid Capture® (QIAGEN); ThinPrep®, PreservCyt® (Cytoc Corporation); Dacron® (DuPont).

© 2008 QIAGEN. Tutti i diritti sono riservati. 1053889 11/2008

[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)

**Australia** ■ 1-800-243-800

**Austria** ■ 0800/281010

**Belgio** ■ 0800-79612

**Francia** ■ 01-60-920-930

**Germania** ■ 02103-29-12000

**Irlanda** ■ 1800 555 049

**Italia** ■ 800 787980

**Lussemburgo** ■ 8002 2076

**Paesi Bassi** ■ 0800 0229592

**Regno Unito** ■ 01293-422-911

**Spagna** ■ 91-630-7050

**Svizzera** ■ 055-254-22-11

